





Provox[®] Life™ Night Adhesive aanbrengen en verwijderen

1. Reinigen

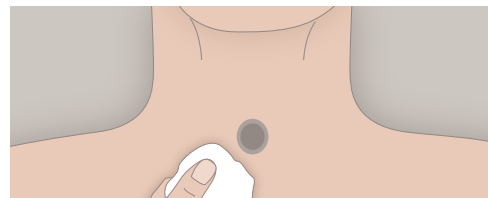


Reinig de huid rond uw stoma met een Provox Cleaning Towel of met water en zeep om olie- en lijmresten te verwijderen. Laat uw huid drogen.

2. Voorbereiden

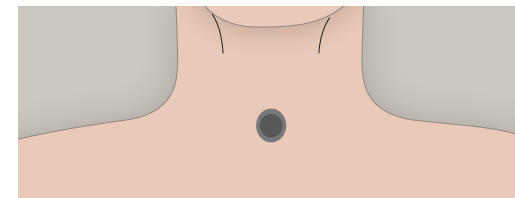


Laat uw huid drogen. Gebruik geen Provox Skin Barrier of producten zoals zeep of een huidcrème die een vettig laagje op de huid achterlaten. Hierdoor kan de pleister mogelijk niet goed hechten.


3. Aanbrengen

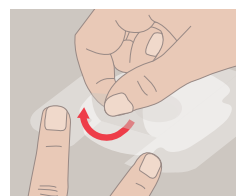


a) Verwijder het middelste gedeelte van de beschermfolie.

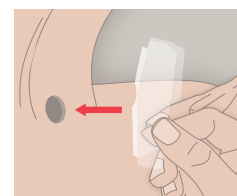

b) Breng de ring van de pleister zo dicht mogelijk bij de opening van uw stoma aan.
c) Masseer het middelste gedeelte op uw huid.

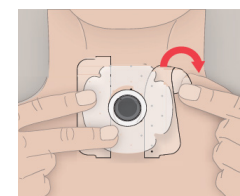


d) Verwijder de beschermfolie van de zijkanten.

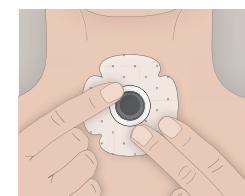

e) Masseer de pleister op uw huid.

4. Verwijderen

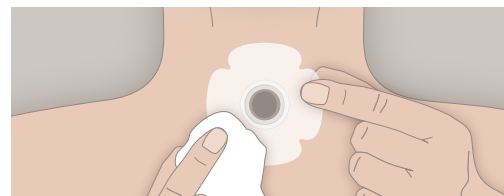

Verwijder de Night Adhesive voorzichtig met een nat doekje. Zorg ervoor dat er geen water in uw stoma druppelt.

Provox[®] Life™ Night Adhesive

De Night Adhesive zorgt ervoor dat uw huid zich kan herstellen terwijl u slaapt. Een huidvriendelijke hydrogelpleister die zacht is voor de huid en bovendien een verkoelende werking heeft.



Provox[®] Cleaning Towel

Om de huid mee te reinigen voordat u een pleister aanbrengt.

